

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA AKCESORIÓW OCHRONNYCH

Przeznaczenie

Akcesoria ochronne są przeznaczone do użytkowania w otoczeniu źródła promieniowania jonizującego. Chronią personel medyczny, pacjenta lub operatora przed rozproszonym promieniowaniem jonizującym.

Użytkowanie

Akcesoria w czasie użytkowania powinny być dokładnie zapięte. Nie należy dopuszczać do zabrudzenia i zanieczyszczenia substancjami organicznymi: krwią i innymi płynami ustrojowymi pacjenta.

Czyszczenie i Konserwacja

Czyścić przez pocieranie miękką gąbką, szmatką lub szczotką z użyciem preparatów do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Fartucha nie wolno zanurzać w roztworze preparatu. Zanieczyszczone miejsca zasypać preparatem dezynfekcyjnym, po zalecanym czasie usunąć. Środki zalecane przez producenta do czyszczenia i dezynfekcji: (wszystkie środki na bazie aktywnego tlenu)

Przechowywanie

Przechowywać w stanie rozwieszonym na wieszaku w suchym i przewiewnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Nie powinny być przechowywane w stanie zwiniętym, poskładanym bądź przewieszonym przez ostre krawędzie (promień krawędzi min. 10 mm), gdyż może to spowodować rozerwanie lub posklejanie się materiałów ochronnych. Akcesoria należy chronić przed działaniem mrozu, temperatury powyżej 40°C i otwartego ognia. Przed użyciem sprawdzić powierzchnie czy nie nastąpiły przekłucia, zagniecenia lub rozerwania mogące spowodować utratę właściwości ochronnych. W przypadku ich stwierdzenia asortyment taki należy poddać sprawdzeniu poprzez prześwietlenie tego miejsca. W przypadku potwierdzenia wady na kliszy, akcesoria należy wycofać z dalszego użytkowania.

Uwagi dotyczące akcesoriów wykonanych z materiału „Xenolite”

Akcesoria „Xenolite” nie mogą być poddane działaniu temperatury powyżej 45 stopni Celsjusza, gdyż może to spowodować lepienie i kurczenie się materiału. Jako że materiał „Xenolite” absorbuje ciepło, należy chronić je przed działaniem promieni słonecznych oraz kontaktem z gorącymi powierzchniami. Jeśli akcesoria mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (transport samochodowy, magazynowanie przy oknie), należy używać płachty lub koca do przykrycia, lub przechowywać akcesoria w opakowaniu.

Tabela klasyfikacji wielkości

Jednopalcowe Ochrony Rąk typ: AD				
Standardowe wielkości akcesorii ochronnych	Symbol	Wymiary (cm)		
		Pół – obwód		Długość
Mały	S	16	11	35
Średni	M	17	12	35
Duży	L	18,5	13	35
Ochrona Tarczycy typ: AT				
Rodzaj	Wielkość	Symbol	Szerokość	Długość
Prosta	Mały	S	58	13
Śliniak 8*	Średni	M	15	8
Śliniak 12*	Duży	L	15	12
* dodatkowo doszyta stójka 5 x 50 (cm)				
Ochrona Ciała do Prześwietleń Kręgosłupa typ: AK				
Wielkość	Symbol	Szerokość	Długość	
Duży	L	15	80	
Ochrona Ramienia typ: AR				
Wielkość	Symbol	Szerokość	Długość	
Duży	L	48	40	
Ochrona na Gonady – Dziecięce typ: AGd				
Wielkość	Symbol	Szerokość	Długość	
Mały	S	30	40	
średni	M	35	45	
Duży	L	40	50	

Stosowane oznaczenia – wyjaśnienie

Akcesoria ochronne oznaczone są na wszystkich etykietach zawierających informację o wartości równoważnika osłabienia promieniowania wyrażonego w mm Pb.

Oznaczenie akcesoriów wykonanych z materiału ochronnego „XENOLITE”



materiał bezolowiowy

Etykieta akcesorii ochronnych – objaśnienie znaków

Na każdej z akcesoriów ochronnych znajduje się etykieta umieszczona na wewnętrznej stronie. Etykieta na akcesoriach ochronnych zawiera następujące informacje:

	1.	Logo producenta
	2.	Nazwa i adres producenta
	3.	Wartość równoważnika osłabienia promieniowania wyrażona w mm Pb
	4.	Napięcie na lampie
	5.	Symbol wielkości akcesorium (podstawowe wymiary wg tabeli klasyfikacji wielkości)
	6.	Informacja o tym, że akcesorium spełnia wymagania normy PN-EN 61331-3:2002 (U)
	7.	Znak ten informuje, że akcesorium chroni użytkownika przed promieniowaniem jonizującym i zobowiązuje użytkownika do przestrzegania instrukcji użytkowania
	8.	Znak CE oznacza, że fartuch odpowiada wymaganiom dotyczącym środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z przepisami europejskimi. Badanie i certyfikat oceny typu WE został przyznany w roku 2004 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa posiadający numer jednostki notyfikowanej 1437
	9.	Pięć znaków graficznych (piktogramów) informujących o sposobie konserwacji akcesorium: 1. Czyścić przez pocieranie. 2. Nie stosować do dezynfekcji preparatów zawierających formaldehyd i związki chloru. 3. Nie prasować. 4. Nie czyścić chemicznie. 5. Mokre akcesorium należy suszyć w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej.
	10.	Typ akcesorium ochronnego
	11.	Równoważnik osłabienia promieniowania wyrażony w mm Pb. Oznaczany przez odpowiednie zakreślenie ochronności.
	12.	Data wyprodukowania akcesorium
	13.	Numer fabryczny – kolejny numer wyrobu.

Główne składowe materiały:

- materiał ochronny ołowianopolichlorowinyłowy o równoważniku osłabienia 0,125 mm Pb lub materiał ochronny polietylenooktanowinyłowy (Xenolite) o równoważniku osłabienia 0,125 mm Pb i 0,175 mm Pb.
- materiał okrywający od zewnątrz: dzianina poliestrowa powleczona poliuretanem
- materiał okrywający od wewnątrz: tkanina poliamidowa powleczona żywicami akrylowymi

! Producent gwarantuje zachowanie walorów użytkowych i ochronnych w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji.

Przy prawidłowym użytkowaniu żywotność akcesorii wynosi kilka lat.

Akcesoria nie nadające się do dalszego użytku należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27.06.1997 r. o odpadach Dz. U. Nr 96, poz. 592 z późniejszymi zmianami)

ASORTYMENT PRODUKTÓW BETAantiX

Lekkie / Ciężkie Fartuchy Ochronne

Lekkie / Ciężkie Zamknięte Fartuchy Ochronne

Akcesoria Ochronne (ochronna tarczycy, jednopalcowe ochrony rąk, ochrona ramienia, ochrona ciała do prześwietleń kręgosłupa, ochrona na gonady – dziecięce)

Jednostka notyfikowana:

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

tel. (0-22) 623 36 98, fax. (0-22) 623 36 93

Numer notyfikacyjny:

1437



Producent:

Biuro Handlowo Usługowe „BETA” s.c.

ul. Porannej Bryzy 31

03-284 Warszawa

tel. (0-22) 675 44 01, fax. (0-22) 675 01 45 w. 24

e-mail: beta@antix.com.pl

<http://www.antix.com.pl/>

