

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PARAWANÓW OCHRONNYCH (POJEDYNCZEGO, PODWÓJNEGO, „VERTICAL”)

Przeznaczenie

Parawan ochronny jest przeznaczony do użytkowania w otoczeniu źródła promieniowania jonizującego. Stosowany jest jako osłona kierunkowa przed promieniowaniem rentgenowskim w diagnostycznych gabinetach RTG, salach zabiegowych, pracowniach rentgena stomatologicznego. Chroni personel medyczny, pacjenta lub operatora w miejscach gdzie wymagane jest mobilne wydzielenie strefy zagrożonej promieniowaniem.

Czyszczenie i Konserwacja

Czyścić przez pocieranie miękką gąbką lub szmatką na mokro z użyciem detergentów rozpuszczonych w ciepłej wodzie. Do czyszczenia parawanu nie używać agresywnych środków chemicznych typu: rozpuszczalnik, benzyna, aceton gdyż może to trwale odbarwić powierzchnie płachty parawanu. Stelaż należy konserwować przy pomocy ogólnodostępnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia i polerowania powierzchni aluminiowych.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Parawan należy chronić przed działaniem mrozu, temperatury powyżej 40°C i otwartego ognia. Przed użyciem sprawdzić powierzchnie ochronną parawanu czy nie nastąpiły przekłucia, zagniecenia lub rozerwania mogące spowodować utratę właściwości ochronnych. W przypadku ich stwierdzenia płachtę ochronną należy poddać sprawdzeniu poprzez prześwietlenie tego miejsca. W przypadku potwierdzenia wady na kliszy, parawan należy wycofać z dalszego użytkowania.


Dane techniczne

Wymiary parawanów (wymiar stelaża / wymiar płachty ochronnej)			
	Pojedynczy	Podwójny	„Vertical”
Szerokość	78 cm / 70 cm	78 cm / 70 cm	78 cm / 70 cm*
Wysokość	121-180 cm / 100 cm	121-180 cm / 100 cm	121-180 cm / 75 cm*
Głębokość	47 cm	47 cm	47 cm
Waga	9,7 kg	15,4 kg	10,9 kg
Budowa			
Stelaż aluminiowy	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Materiał ochronny	1 szt.	2 szt.	7 szt.
Zestaw kółek	4 szt.	4 szt.	4 szt.
Zestaw śrub	4 szt.	4 szt.	4 szt.
*typ „Vertical” składa się z 7 szt. nachodzących na siebie pasów o wymiarach 15x75 cm Do każdego typu parawanu dołączany jest klucz imbusowy przy pomocy którego należy przykręcić kółka do podstawy stelaża aluminiowego.			

Obsługa

Parawany ochronne wykonane z powlekanej gumy rentgenoochronnej przygotowane są do bezpośredniego użytkowania po wykonaniu kilku czynności montażowych.
Kolejność rozkładania parawanu:

1. Przy pomocy klucza i śrub ampulowych przykręcić 4 kółka do stelaża parawanu. Śruby prowadzić w nagwintowane otwory przygotowane w podstawie parawanu.
2. Rozłożyć stelaż do pozycji pionowej zabezpieczając go przy pomocy wspornika z zatrzaskiem kulkowym wprowadzając go do tulejki zamieszczonej na środkowej poprzeczce parawanu.
3. Wszystkie typy parawanów posiadają regulację pionową. Do regulacji służą zamieszczone na pionowych rurkach pokrętki. W celu odpowiedniego ustawienia wysokości ochrony parawanu należy wstępnie poluzować wskazane pokrętki, wyciągnąć poprzeczkę z płachtą na odpowiednią wysokość i zabezpieczyć skręcając pokrętki do lekkiego oporu.

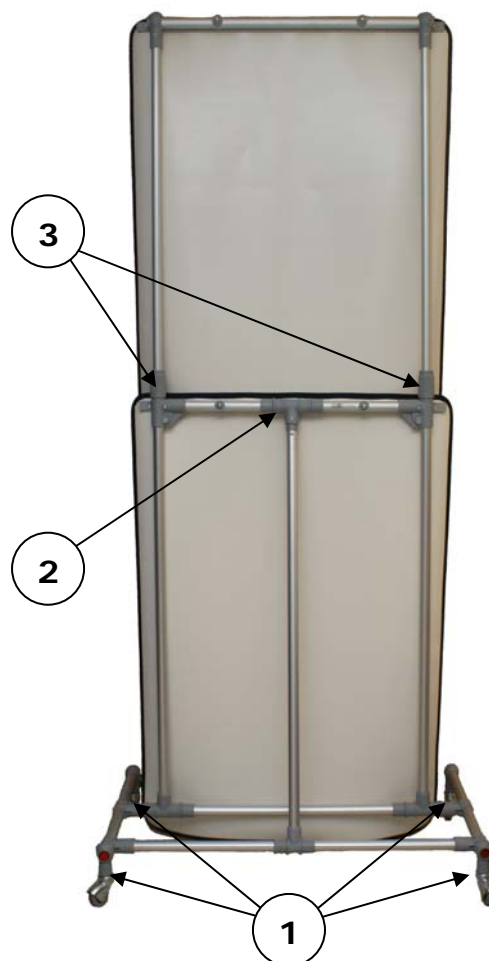

Oznaczenia parawanów ochronnych

Parawany ochronne oznaczone są etykietą znamionową srebrną zawierającą informację o wartości równoważnika osłabienia promieniowania wyrażonego w mm Pb.

0,5 mm Pb

Równoważnik osłabienia promieniowania wyrażony w mm Pb. Wszystkie modele parawanów posiadają jednakowy równoważnik wynoszący 0,5 mm Pb.

Główne składowe materiały:

- materiał ochronny ołowianopolichlorowinyłowy o równoważniku osłabienia 0,50 mm Pb
- aluminium anodyzowane
- kółka łożyskowane metalowe

Informacje dodatkowe

Nowo wyprodukowane parawany mogą wydawać z siebie nieprzyjemny zapach. Jest to naturalna woń nowej gumy, która z czasem użytkowania zostanie zniwelowana. Zapach nie jest szkodliwy dla zdrowia.



Producent gwarantuje zachowanie walorów użytkowych i ochronnych w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji.

Przy prawidłowym użytkowaniu żywotność akcesorii wynosi kilka lat.

Akcesoria nie nadające się do dalszego użytku należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27.06.1997 r. o odpadach Dz. U. Nr 96, poz. 592 z późniejszymi zmianami)

ASORTYMENT PRODUKTÓW BETAantiX

Lekkie / Ciężkie Fartuchy Ochronne

Lekkie / Ciężkie Zamknięte Fartuchy Ochronne

Akcesoria Ochronne (ochronna tarczycy, jednopalcowe ochrony rąk,

ochrona ramienia, ochrona ciała do prześwietleń kręgosłupa,

ochrona na gonady – dziecięce)

Okulary Ochronne

Drzwi i Okna Rentgenoochronne

Asortyment Pomocniczy

Jednostka notyfikowana:

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY

- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

tel. (0-22) 623 36 98,

fax. (0-22) 623 36 93

Numer notyfikacyjny:

1437



Producent:

Biuro Handlowo Usługowe „BETA” s.c.

ul. Porannej Bryzy 31

03-284 Warszawa

tel. (0-22) 675 44 01,

fax. (0-22) 675 01 45 w. 24

e-mail: beta@antix.com.pl

<http://www.antix.com.pl/>

